

Javel®

GWARANCJA HIGIENY

Tabletki dezynfekcyjne

Tabletki o pełnym spektrum działania uwalniające aktywny chlor. Niskie stężenia użytkowe to niski koszt roztworu użytkowego. Skuteczna substancja aktywna wykazująca natychmiastowe działanie również w obecności obciążenia substancjami organicznymi.



Sposoby sporządzania roztworów użytkowych:

Placówki służby zdrowia

Powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi	1	+ 1,5L wody	= 1 000 ppm B, F, V	czas działania 15 min
Powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi	2	+ 1,5L wody	= 2 000 ppm B, Tbc, F, V, S	
Powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	6	+ 1,5L wody	= 6 000 ppm B, Tbc, F, V	
Odkażanie miejscowe (wydaliny, wydzieliny, krew)	10	+ 1,5L wody	= 10 000 ppm B, Tbc, F, V	
Dezynfekcja sprzętu zanieczyszczonego substancjami organicznymi	6	+ 1,5L wody	= 6 000 ppm B, Tbc, F, V	
Działanie sporobójcze wobec Clostridium difficile NCTC 11209 wg. normy EN 13704	1	+ 1L wody	= 1 500 ppm B, F, V, S	6 min

Placówki oświatowe, domy opieki, hotele, gastronomia

Powierzchnie podłóg	1-2	+ 10L wody	= 150-300 ppm B, F, V	czas działania 30 min
Urządzenia i naczynia kuchenne, blaty i lady gastronomiczne	2	+ 10L wody	= 300 ppm B, F, V	
Urządzenia sanitarne i kanalizacyjne, kratki ściekowe	4	+ 10L wody	= 600 ppm B, F, V	
Kabiny prysznicowe, wanny, szatnie, pojemniki na odpady	10	+ 10L wody	= 1500 ppm B, F, V	

Dostępne opakowania: pojemnik 150 tabletek, pojemnik 300 tabletek

Produkt posiada pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych nr 4958/12. Skuteczność działania substancji aktywnej - NaDCC - potwierdzona badaniami PZH.

Dystrybutor:



Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
tel. 22 570 90 00, e-mail: medim@medim.pl www.medim.pl

1 Bakteriobójcze EN 13727

2 Grzybobójcze EN 13624

3 Prątkobójcze IGiCHP (W-wa)

4 Wirusobójcze EN 14476

5 Sporobójcze EN 13704

PEŁNE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Proces dezynfekcji rozpoczynać po uprzednim umyciu powierzchni i sprzętów. Podczas dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi wydziela się szkodliwy chlor. Należy stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Należy pamiętać o dokładnym spłukaniu wodą po zabiegu odkażania. **Uwaga!** Roztwory robocze należy przygotowywać przed bezpośrednim użyciem. Każda pastylka uwalnia 1,5 g aktywnego chloru. **Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki - www.javel.pl**

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI, PRZEDMIOTÓW I SPRZĘTÓW